


QPoint™ tap ドッキングステーションの取り付け方

エアレーターを
外します



コネクターを接続し
ます

ドッキングステーション
を接続します

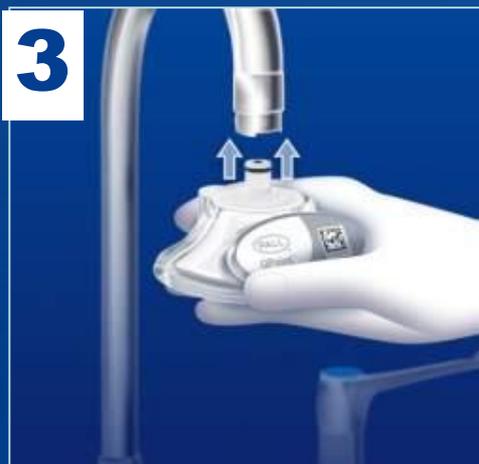


Oリングがあることを
確認します

QPoint™ tap フィルターカプセル 取り付け方法



パッケージを開封します

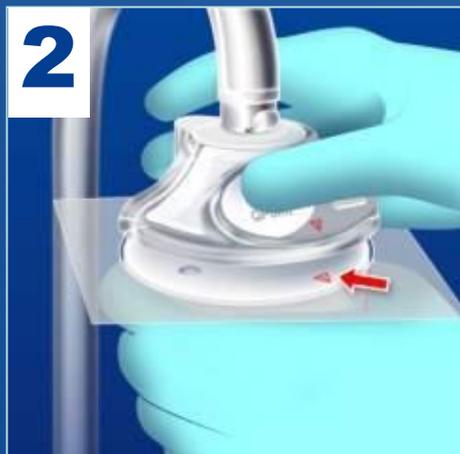

ドッキングステーションとフィルターカプセルの三角印を合わせます。



ドッキングステーションとカプセルを接続します。



パッケージを取り除きます

フィルターカプセルの取り外し



ピンを引き上げて、フィルターカプセルを回して使用済みカプセルフィルターを交換してください

注意事項



フィルターカプセルに触らないでください



出口を拭かないでください



ドッキングステーションを外さないでください